

# Údržba uhlíkových mikromotorů MC2 a MC3



Tohle zdravotnické zařízení je dodáváno v "nesterilním" stavu. Ujistěte se, že je tento postup dodržován i před prvním použitím nástroje.

## 1 Příprava



A. ODDĚLTE MOTOR OD HADICE



B. ODEJMĚTE KRYTKU MIKROMOTORA

## 2 Čištění




A. EXTERNÍ ČIŠTĚNÍ

- Vnější část násadce vyčistíte hadříkem napuštěným Spraynetem



## 3 Dezinfekce

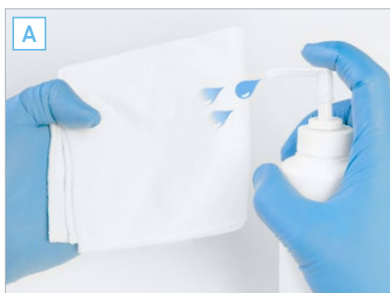


A. POVRCHOVÁ DEZINFEKCE

(Dle instrukcí výrobce vašeho dezinfekčního prostředku)

**⊘ Neponořujte přístroj do dezinfekční nádoby**



## 5 Sterilizace

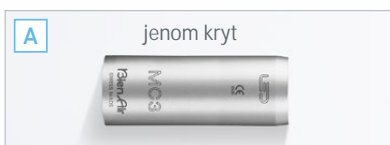

A. VLOŽTE KRYT MOTORU DO STERILIZAČNÍHO SÁČKU

B. STERILIZUJTE V SOULADU S INSTRUKCEMI VÝROBCE AUTOKLÁVU

- Nářadí s tímto symbolem: , je možné sterilizovat v autoklávu



# Príslušenství



SPRAYNET  
500 ml čistící sprej  
REF. 1600036-001

