



Údržba bez-uhlíkových mikromotorů MCX a MX2

Tohle zdravotnické zařízení je dodáváno v "nesterilním" stavu. Ujistěte se, že je tento postup dodržován i před prvním použitím nástroje.

1 Příprava a čištění



A. ODDĚLTE MOTOR OD HADICE

B. OČISTĚTE POD TEKOUČÍ VODOU <38°C

3 Dezinfekce



A. POVRCHOVÁ DEZINFEKCE

(Dle instrukcí výrobce vašeho dezinfekčního prostředku)

⊘ **Neponořujte přístroj do dezinfekční nádoby**

5 Sterilizace



A. VLOŽTE MIKROMOTOR DO STERILIZAČNÍHO SÁČKU

B. STERILIZUJTE V SOULADU S INSTRUKCEMI VÝROBCE AUTOKLÁVU

• Nářadí s tímto symbolem: , je možné sterilizovat v autoklávu