



Údržba násadců pro implantologii a chirurgii

Tohle zdravotnické zařízení je dodáváno v "nesterilním" stavu. Ujistěte se, že je tento postup dodržován i před prvním použitím nástroje.

1 Příprava




A. ODSTRANĚNÍ VRTÁKU

- Vyměňte vrták z upínacího mechanismu
- Odejměte násadec od mikromotoru

B. PRVOTNÍ DEZINFEKCE

- Povrchová dezinfekce

2 Čištění

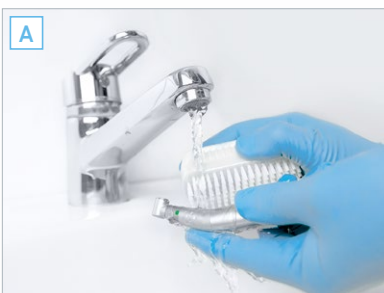


A. ČIŠTĚNÍ POD TEKOUČÍ VODOU <math><38^{\circ}\text{C}</math>

B. ODSTRANĚNÍ NEČISTOT


- Opatrně odstraňte všechny stopy nečistot nebo usazenin pomocí čistícího špendlíku Bien-Air
- Trysky vysušte vzduchem a pak otřete zbytek nástroje s látkou

⊘ Neponořujte do ultrazvukové čističky

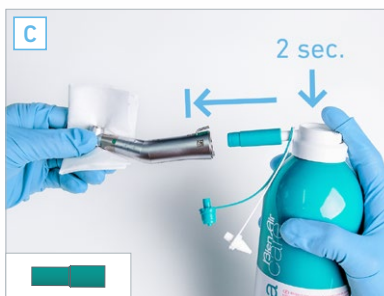

C. VNITŘNÍ ČIŠTĚNÍ S AQUACARE

- Použijte Aquacare ihned po skončení práce po každém pacientovi
- Před použitím Aquacare protřeptejte
- Použijte násadu Aquacare* ①
- Udržujte hlavičku nástroje směrem dolů a stiskněte tlačítko spreje Aquacare po dobu 2 sekund
- Použijte násadu Aquacare* ③
- Udržujte hlavičku nástroje směrem dolů a stiskněte tlačítko spreje Aquacare po dobu 1 sekundy

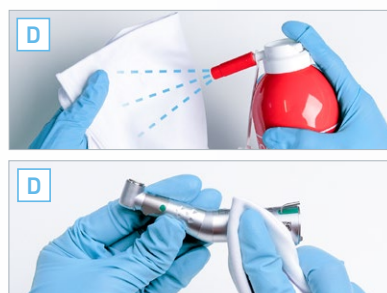

D. VNITŘNÍ A EXTERNÍ ČIŠTĚNÍ SPRAYNETEM

- Použijte Spraynet nejpozději 30 minut po skončení práce po každém pacientovi
- Před použitím Spraynet protřeptejte
- Použijte násadu Spraynet* ①
- Udržujte hlavičku nástroje směrem dolů a stiskněte tlačítko spreje Spraynet po dobu 1 sekundy
- Vnější část násadce vyčistěte hadříkem napuštěným Spraynetem

3 Dezinfekce



A. POVRCHOVÁ DEZINFEKCE

(Dle instrukcí výrobce vašeho dezinfekčního prostředku)

NEBO

B. TERMÁLNÍ DEZINFEKCE

(Dle instrukcí výrobce termální čističky)



4 Mazání



A. MAZÁNÍ SPREJEM LUBRIFLUID

- Použijte Lubrifluid po vyčištění násadce Aquacarem a Spraynetem po každém pacientovi, před každým sterilizačním cyklem
- Před použitím sprej Lubrifluid protřepejte
- Použijte násadu Lubrifluid* ①
- Udržujte hlavičku nástroje směrem dolů a stiskněte tlačítko spreje Lubrifluid po dobu 1 sekundy
- Přemazaný násadec nechte 20 minut odtéct s hlavičkou směřující dolů tak, aby z ní mohli vytékat všechny zbytky oleje. Pak sterilizujte.

5 Sterilizace



A. VLOŽTE NÁSADEC DO STERILIZAČNÍHO SÁČKU

B. STERILIZUJTE V SOULADU S INSTRUKCEMI VÝROBCE AUTOKLÁVU

- Nářadí s tímto symbolem: , je možné sterilizovat v autoklávu

△ Sterilizujte pouze nářadí, které bylo očištěno a promazáno

- Po sterilizaci spusťte test násadce po dobu 10 - 15 sekund na nízkých otáčkách, aby se odstranilo přebytečné množství maziva

* Všechny odkazy na vybrané násady spreje jsou uvedeny na poslední stránce dokumentu.



SPRAYNET
500 ml čistící sprej
REF. 1600036-001



LUBRIFLUID
500 ml mazací sprej
REF. 1600064-001



AQUACARE
500 ml čistící sprej
REF. 1600064-001



LUBRICARE polo-automatický
systém čištění a mazání
REF. 1600915-001



LUBRIMED vazelína
REF. 1600037-006



BIEN-AIR čistící špendlík
REF. 1000001-010