



Údržba turbin

Tohle zdravotnické zařízení je dodáváno v "nesterilním" stavu. Ujistěte se, že je tento postup dodržován i před prvním použitím nástroje.

1 Příprava



A. ODSTRANĚNÍ VRTÁKU

- Vyjměte vrták z upínacího mechanismu

B. PRVOTNÍ DEZINFEKCE

- Povrchová dezinfekce

2 Čištění




A. ČIŠTĚNÍ POD TEKOUČÍ VODOU <38°C

B. ODSTRANĚNÍ NEČISTOT

- Opatrně odstraňte všechny stopy nečistot nebo usazenin pomocí čistícího špendlíku Bien-Air
- Trysky vysušte vzduchem a pak otřete zbytek nástroje s látkou

⊘ Neponořujte do ultrazvukové čističky

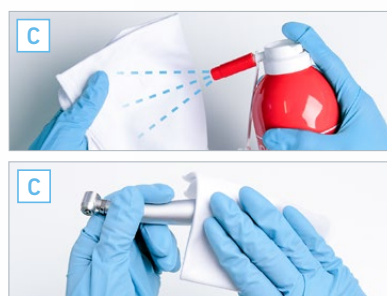

C. VNITŘNÍ A EXTERNÍ ČIŠTĚNÍ SPRAYNETEM

- Používejte Spraynet nejpozději 30 minut po skončení práce po každém pacientovi
- Před použitím Spraynet protřepejte
- Použijte násadu Spraynet* ① (pro 2/3-cestní a 4-cestní turbíny uplatněte postup uvedený níže)
- Udržujte hlavičku nástroje směrem dolů a stiskněte tlačítko spreje na dobu 1 sekundy
- Vnější část turbíny vyčistěte hadříkem napuštěným Spraynetem

Postup pro 2/3- cestní a 4-cestní turbíny



C': VNITŘNÍ ČIŠTĚNÍ JENOM PRO 2/3-CESTNÍ A 4-CESTNÍ TURBÍNY

- Použijte násadu Spraynet* ②
- Udržujte hlavičku nástroje směrem dolů a stiskněte tlačítko spreje Spraynet po dobu 1 sekundy
- ⚠ Prostřekujte jenom ty otvory 2/3-cestní a 4-cestní turbíny, na které ukazují modrá šipka.

3 Dezinfekce



A. POVRCHOVÁ DEZINFEKCE



(Dle instrukcí výrobce vašeho dezinfekčního prostředku)

NEBO

B. TERMÁLNÍ DEZINFEKCE

(Dle instrukcí výrobce termální čističky)

4 Mazání

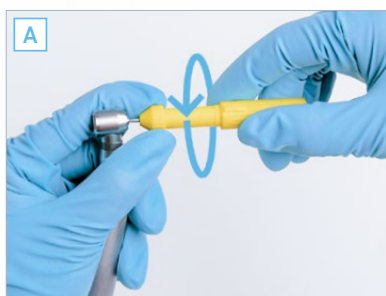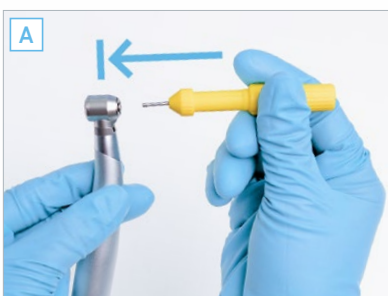

BUĎ: A. MAZÁNÍ VAZELINOU LUBRIMERED


- Používejte Lubrimered po vyčištění násadce Spraynetem po každém pacientovi, před každým sterilizačním cyklem
- Vložte patronu dovnitř hlavičky a udělejte půl otáčky

ANEBO: B. MAZÁNÍ SPRAJEM LUBRIFLUID

- Používejte Lubrifluid po vyčištění násadce Spraynetem po každém pacientovi, před každým sterilizačním cyklem
- Před použitím sprej Lubrifluid protřeptejte
- Zvolte násady spreje Lubrifluid ② ③ nebo ④ dle typu turbíny* (pro 2/-3 cestní a 4-cestní turbíny uplatněte postup uvedený níže)
- Udržujte hlavičku nástroje směrem dolů a stiskněte tlačítko spreje na dobu 1 sekundy
- Přemazanou turbínu nechte 20 minut odtéct s hlavičkou směřující dolů tak, aby z ní mohli vytékat všechny zbytky oleje. Pak sterilizujte.



Postup pro 2/3- cestní a 4-cestní turbíny

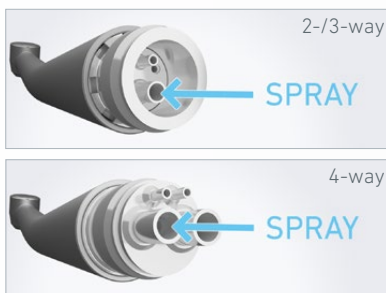

B': VNITŘNÍ MAZÁNÍ PRO 2/3-CESTNÍ A 4-CESTNÍ TURBÍNY

- Použijte násadu Lubrifluid* ②
- Udržujte hlavičku nástroje směrem dolů a stiskněte tlačítko spreje Lubrifluid po dobu 1 sekundy

△ Prostřekujte jenom ty otvory 2/3-cestní a 4-cestní turbíny, na které ukazuje modrá šipka.

5 Sterilizace



A. VLOŽTE TURBINU DO STERILIZAČNÍHO SÁČKU

B. STERILIZUJTE V SOULADU S INSTRUKCEMI VÝROBCE AUTOKLÁVU

- Nářadí s tímto symbolem: , je možné sterilizovat v autoklávu

△ Sterilizujte pouze nářadí, které bylo očištěno a promazáno

- Po sterilizaci spusťte test turbíny po dobu 10 - 15 sekund na nízkých otáčkách, aby se odstranilo přebytečné množství maziva

* Všechny odkazy na vybrané násady spreje jsou uvedeny na poslední stránce dokumentu.

Príslušenství



SPRAYNET
500 ml čistící sprej
REF. 1600036-001



Bora L / LK, Boralina,
Prestige L / LK, Tornado L / LK



Black Pearl Eco 3- and 4-way



LUBRIFIUID
500 ml mazací sprej
REF. 1600064-001



Black Pearl Eco 3- and 4-way



Bora L, Boralina, Prestige L,
Tornado L, Boralina



Bora LK, Prestige LK, Tornado LK



LUBRICARE polo-automatický
systém čišťení a mazání
REF. 1600915-001



LUBRIMED vazelína
REF. 1600037-006



BIEN-AIR čistící špendlík
REF. 1000001-010